




# تعليمات الإستعمال

## پرالوئنت 300 ملг/2 مل محلول للحقن

### بعلم جاهز للإستعمال

أجزاء قلم پرالوئنت موصوفة في هذه الصورة.

للاستعمال لمرة واحدة فقط

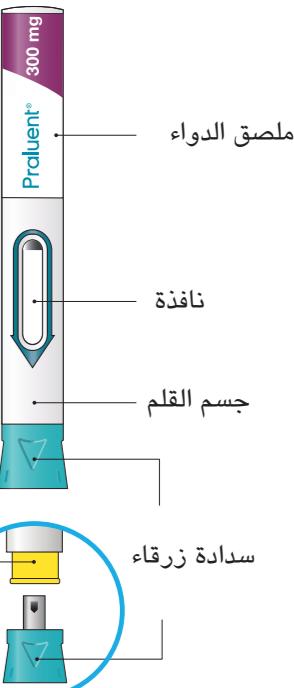

#### معلومات هامة

- \* يتم حقن الدواء تحت جلدك ويمكنك إستعماله بنفسك أو أن يعطى بمساعدة شخص آخر (معالج).
- \* من المهم لا تحاول الحقن لنفسك أو لشخص آخر بدون تلقي إرشاد من المعالج الخاص بك.
- \* بالإمكان إستعمال هذا القلم لمرة واحدة فقط، ويجب رميه بعد الإستعمال.

#### إفعل:

- ✓ إحفظ قلم پرالوئنت بعيداً عن متناول أيدي و المجال روؤية الأطفال.
- ✓ إقرأ بتمعن كافة التعليمات قبل إستعمال پرالوئنت.
- ✓ تصرف وفقاً للتوجيهات في كل مرة تستعمل فيها قلم پرالوئنت.

#### لا تفعل:

- ✗ لا تلمس غطاء الأمان الأصفر.
  - ✗ لا تستعمل القلم إذا سقط أو تضرر.
  - ✗ لا تستعمل القلم إذا كانت السدادة الزرقاء ناقصة أو غير موصولة بأمن.
  - ✗ لا تعاود إستعمال القلم.
  - ✗ لا تخض القلم.
  - ✗ لا يجوز تجميد القلم.
  - ✗ لا تعرّض القلم لحرارة شديدة.
  - ✗ لا تعرّض القلم لضوء الشمس المباشر.
- احفظ هذه النشرة. إذا توفر لديك أي سؤال راجع الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

#### المرحلة أ: تحضير للحقن

##### قبل أن تبدأ جهز لنفسك:

- \* قلم پرالوئنت
- \* ضمادات كحولية
- \* كرة من القطن أو شاش
- \* وعاء مقاوم للوحز (أنظر المرحلة ب 7).

89004478


### 1) أنظر إلى الملصقة الموجودة على القلم

- \* تأكد من أنك تمكّن المستحضر الصحيح والمقدار الدوائي الصحيح.
- \* تحقق من تاريخ إنقضاء الصلاحية: إذا إنقضى التاريخ فلا تستعمل المستحضر.
- \* لا تستعمل قلم پرالوئنت إذا سقط على سطح صلب أو تضرر.



### 2) إفحص النافذة

- \* تأكد من أن السائل رائق، عديم اللون أو بلون أصفر فاتح وخالي من الجزيئات - إذا لم يكن كذلك، فلا تستعمله (أنظر الرسم A).
- \* لا تستعمل الدواء إذا كان محلول باهتاً أو عكراً، أو إذا إحتوى على فتات أو جسيمات ظاهرة للعين.
- \* من الجائز أن ترى فقاوة هواء. هذا الأمر سليم.
- \* لا تستعمل إذا كان اللون في النافذة هو أصفر شديد الصفرة (أنظر الرسم B).

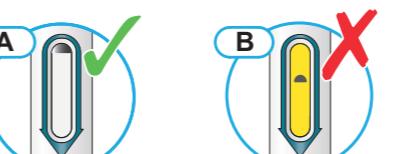

### 3) دع القلم ليدفع بدرجة حرارة الغرفة لمدة 45 دقيقة.

- \* هذا مهم لإتاحة إعطاء كامل المقدار الدوائي والمساعدة على تقليل عدم الراحة.
- \* لا تدفع القلم، دعه ليدفع من ثاقنه نفسه.
- \* لا تعيد القلم إلى البراد.



### 4) حضر مكان الحقن

- \* إغسل يديك بالماء والصابون وجففهما بواسطة منشفة.

#### يمكن الحقن في:

- الجزء العلوي من الفخذ
- البطن (عدا المنطقة 5 سم من حول السرة)
- الجزءخارجي من أعلى الذراع (بالإعطاء من قبل المعالج الخاص بك فقط)

- \* يمكنك الحقن لنفسك بينما تكون جالساً أو واقفاً.

- \* نظف الجلد في منطقة الحقن بواسطة ضماد كحولي.


- \* لا تحقن في جلد حساس، صلب، أحمر أو ساخن.

- \* لا تحقن في أي منطقة يبيدو فيها وريد ظاهر للعين.

- \* إحقن كل مرة في نقطة مختلفة.


- \* لا تحقن پرالوئنت في نفس النقطة مع أدوية أخرى

- \* تعطى بالحقن.

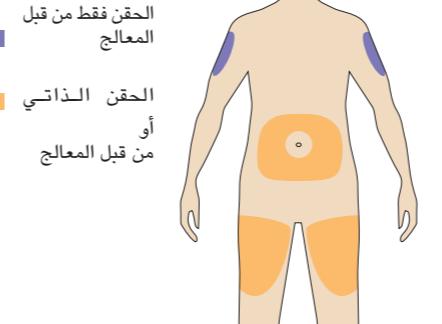

### 4) واصل إمساك القلم بشكل ملائم لجلدك.

- \* من الجائز أن تسمع صوت طقة ثانية.
- \* تأكد من تغير لون كامل النافذة إلى الأصفر.
- \* من ثم، إبدأ العد حتى 5 ببطء.

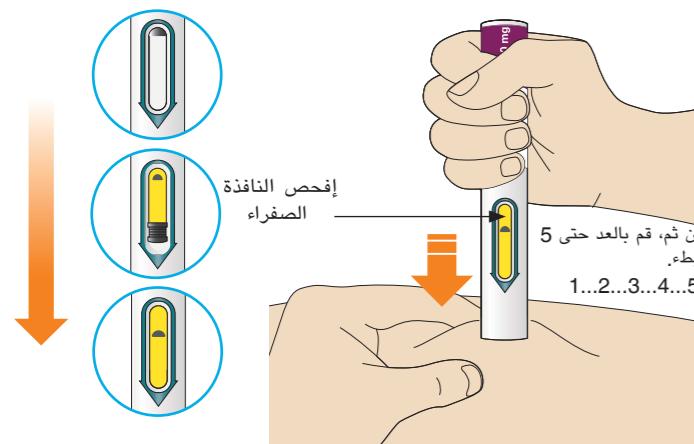


### 5) قبل تحريك القلم، تأكد من تغير لون النافذة إلى الأصفر.

- \* إذا لم يتغير لون النافذة بشكل تام إلى اللون الأصفر، قم بتنزع القلم وتوجه إلى الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.
- \* لا تحقن لنفسك مقداراً دوائياً ثانياً من دون التحدث مع الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.


### 6) قم بإبعاد القلم عن جلدك.

- \* لا تفرك الجلد بعد الحقن.
- \* إذا لاحظت وجود دم، قم بإلصاق كرمة من القطن أو الشاش لمكان الحقن إلى أن يتوقف النزف.

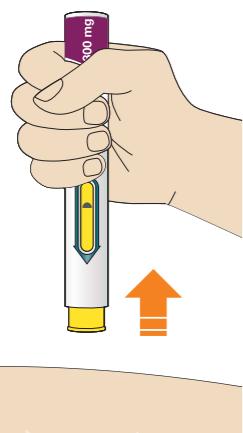

### 7) إرم القلم والسدادة.

- \* لا تعد السدادة الزرقاء إلى مكانها.
- \* إرم القلم والسدادة الزرقاء إلى وعاء تجميع الإبر والأقلام المستعملة (مقاومة للوحز) حالاً بعد الحقن.
- \* إسأل الطبيب، الصيدلي أو الممرضة حول كيفية التخلص من الوعاء.
- \* احفظ دائمًا الوعاء بعيداً عن متناول أيدي و المجال روؤية الأطفال.

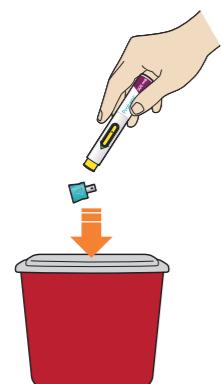

### المرحلة ب: كيفية الحقن

#### 1) بعد إتمام كل المراحل الخاصة بـ «مرحلة أ: تحضير للحقن»، قم

##### بتنزع السدادة الزرقاء

- \* لا تنزع السدادة الزرقاء قبل أن تكون مستعداً للحقن.
- \* لا تعيّد السدادة الزرقاء إلى مكانها.

##### لاتستعمل القلم إذا كانت السدادة الزرقاء ناقصة أو غير موصولة جيداً.

- \* لا تستعمل القلم جاهز للحقن إلا سقط على سطح صلب أو تضرر.




### 2) أمسك قلم پرالوئنت بهذه الطريقة.

- \* لا تلمس غطاء الأمان الأصفر.

- \* تأكد من أنك تستطيع رؤية النافذة.

- \* لا تلصق القلم بجلدك حتى تكون مستعداً للحقن.

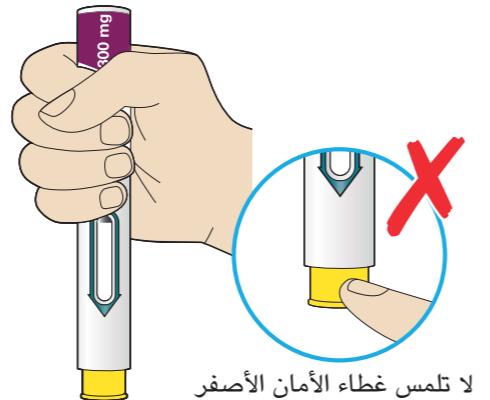

### 3) أقصي غطاء الأمان الأصفر إلى جلدك بزاوية قدرها 90 درجة تقريباً.

- \* أقصي جلدك للتأكد من ثبات مكان الحقن.

- \* إضغط وأمسك القلم ملائماً لجسمك إلى أن يتم دفع غطاء الأمان الأصفر حتى النهاية لداخل القلم وواصل الإمساك (أنظر الرسم)
- \* لن يعمل القلم إذا لم يتم ضغط غطاء الأمان الأصفر حتى النهاية.
- \* ستصمم صوت طقة عند بدء الحقن. سيبدأ لون النافذة بالتغيير إلى اللون الأصفر.

