

تعليمات الإستعمال

دوبيكسنت 300 ملغ


قلم أحادي الإستعمال جاهز للإستعمال

تعليمات الإستعمال تحتوي على معلومات تشرح كيفية حقن دوبيكسنت.

اقرأ تعليمات الإستعمال قبل إستعمال القلم. لا تحقن لنفسك أو لشخص آخر حتى يرشدوك كيفية حقن دوبيكسنت. يستطيع الطاقم الطبي خاصتك أن يريك أنت أو مُعالجك كيف تستعد وتحقن مقدار دوائي من دوبيكسنت وذلك قبل أن تحاول القيام بذلك بنفسك في المرة الأولى. إحتفظ بهذه التعليمات لإستعمال مستقبلي. إتصل بالطاقم الطبي الخاص بك إذا توفرت لديك أسئلة.

قلم دوبيكسنت الجاهز للإستعمال مخصص للإستعمال لدى الكبار والأطفال من عمر 6 سنوات وما فوق. قلم دوبيكسنت الجاهز للإستعمال هو أداة أحادية الإستعمال. هو يحتوي على 300 ملغ من دوبيكسنت للحقن تحت الجلد (حقن تحت الجلد).

أجزاء قلم دوبيكسنت الجاهز للإستعمال معروضة أدناه:

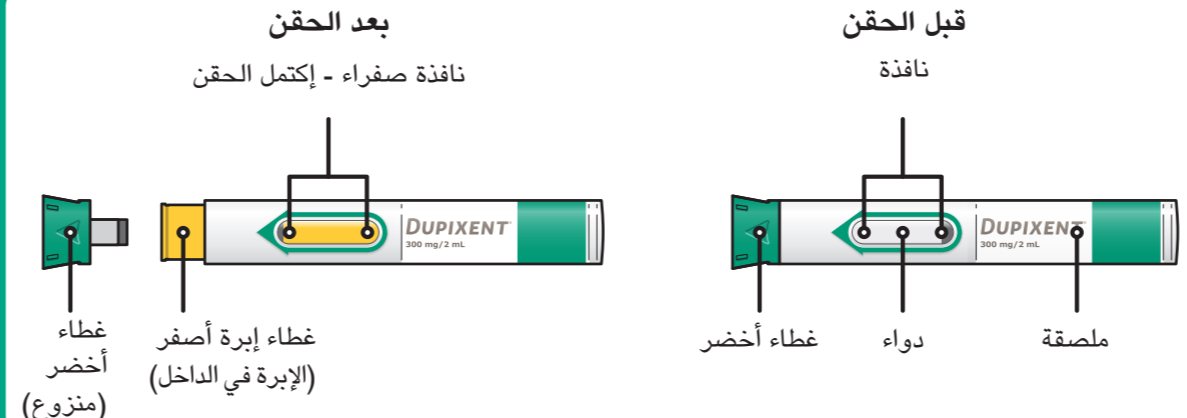

أ. تجهز للحقن

1: جهز المعدات

إختر سطح عمل نظيف ومسطح. تأكد من أن لديك الأشياء التالية: قلم دوبيكسنت *مئبدل كحولي *كرة قطنية أو ضماد شاشي *وعاء مقاوم للتقرب (أنظر المرحلة د)

*هذه الأشياء غير مشمولة في علبه المستحضر

2: إفحص القلم

لا تستعمل قلم دوبيكسنت إذا تضرر. لا تستعمل قلم دوبيكسنت إذا كان الغطاء الأخضر ناقصاً أو غير محكم الإغلاق. لا تستعمل قلم دوبيكسنت إذا كانت النافذة صفراء قبل الإستعمال.

3: أضمن النظر في الممصقة

إفحص المستحضر والمقدار الدوائي



إفحص تاريخ إنقضاء الصلاحية. لا يجوز إستعمال قلم دوبيكسنت إذا إنقضت تاريخ الصلاحية.



4: إفحص الدواء



إفحص النافذة

أضمن النظر بالدواء عبر النافذة. يجب أن يكون رائقاً وعديم اللون حتى لون أصفر شاحب. إنتبه: من الجائز أن ترى فقاعة هواء، هذا الأمر طبيعي.

لا تستعمل القلم إذا تغير لون السائل أو كان عكراً، أو إذا كان يحتوي على فتات أو جسيمات ظاهرة للعين.

معلومات هامة


- إقرأ كافة التعليمات بتمعن قبل إستعمال قلم دوبيكسنت الجاهز للإستعمال.
- إستوضح من الطاقم الطبي الخاص بك حول الوتيرة التي بموجبها عليك حقن الدواء.
- يوصي بإعطاء دوبيكسنت من قبل شخص بالغ أو تحت إشرافه، وذلك لدى أطفال بعمر 12 سنة وما فوق.
- يجب أن يُعطى دوبيكسنت من قبل معالج، وذلك لدى أطفال من عمر 6 سنوات حتى أقل من 12 سنة.
- إختر موقع حقن آخر لكل عملية حقن.
- لا تضغط أو تلمس غطاء الإبرة الأصفر بأصابعك.
- لا تحقن عبر الملابس.
- لا تنزع الغطاء الأخضر إلا قبل الحقن مباشرة.
- لا تحاول إعادة الغطاء الأخضر على القلم.
- تخلص من القلم المُستعمل مباشرة بعد الإستعمال.
- لا تقم بإعادة إستعمال قلم دوبيكسنت الجاهز للإستعمال.

تخزين دوبيكسنت

- إحفظ الأقلام قبل الإستعمال في البراد، في درجة حرارة ما بين 2-8 درجات مئوية.
- إحتفظ بالأقلام في العلبة الأصلية لحمايتها من الضوء.
- إذا لزم الأمر، يمكن تخزين أقلام دوبيكسنت في درجة حرارة الغرفة (حتى 25 درجة مئوية) لمدة حتى 14 يوماً.
- لا تخزن أقلام دوبيكسنت في درجة حرارة غرفة تزيد عن 25 درجة مئوية.
- بعد إخراج قلم دوبيكسنت من البراد، يجب إستعماله في غضون 14 يوماً أو التخلص منه.
- لا يجوز خض القلم أبداً.
- لا يجوز تسخين القلم.
- لا يجوز تجميد القلم.
- لا يجوز وضع القلم في ضوء الشمس المباشر.
- إحفظ أقلام دوبيكسنت والأدوية الأخرى بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال.

ب. إختر وجهز موقع الحقن

1: إغسل يديك جيداً بالصابون والماء

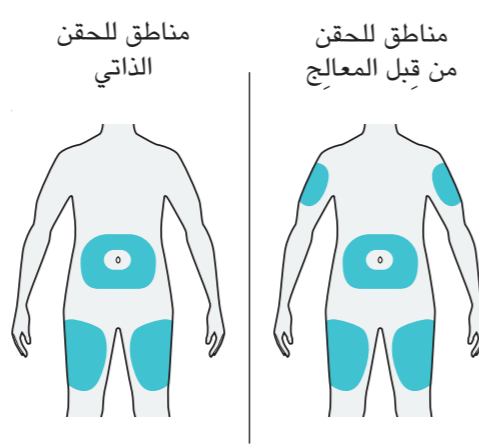

5: إنتظر 45 دقيقة



ضع قلم دوبيكسنت على سطح مستو ودعه يسخن بشكل طبيعي بدرجة حرارة الغرفة، التي هي دون 25 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة على الأقل.


لا تسخن قلم دوبيكسنت في جهاز الميكروويف، في الماء الساخن أو في ضوء الشمس المباشر.

2: إختر موقع الحقن

- الفخذ
- البطن، ما عدا 5 سم من حول سرتك.
- يمكن للمعالج أن يحقن أيضاً في المنطقة الخارجية من أعلى ذراعك.
- إختر موقع حقن مختلف في كل مرة تحقن فيها دوبيكسنت.
- لا يجوز الحقن داخل جلد حساس، متضرر، به كدمة أو ندبة أو في مناطق فيها أوردة ظاهرة للعين.
- لا يجوز الحقن عبر الملابس.


3: جهز موقع الحقن

- نظف موقع الحقن بمئبدل كحولي.
- دح الجلد يجف قبل الحقن.
- لا تلمس موقع الحقن مرة أخرى ولا تزفر عليه قبل الحقن.

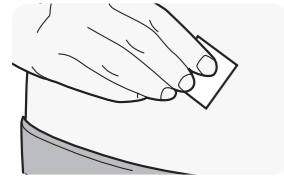

ج. إعطاء الحقنة


1: إنزع الغطاء الأخضر

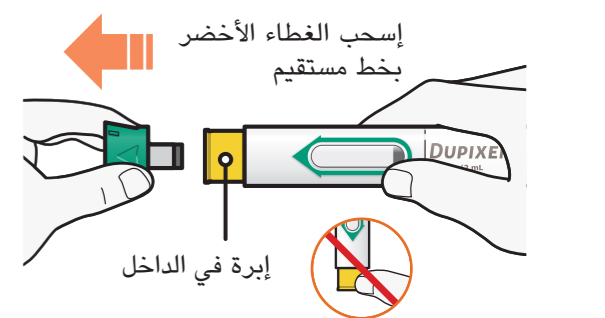

- إنزع الغطاء الأخضر عن طريق سحبه كما هو موضح في الرسم. لا تدور الغطاء الأخضر.
- لا تنزع الغطاء الأخضر إلى أن تكون مستعداً للحقن.
- لا تلمس أو تضغط على غطاء الإبرة الأصفر بأصابعك. الإبرة موجودة في الداخل.
- لا تقم بإعادة الغطاء الأخضر إلى القلم بعد نزعه.

2: أقرص الجلد وضع

- أقرص الجلد قبل وخلال الحقن.
- أمسك قلم دوبيكسنت بحيث تتمكن من رؤية النافذة. ضع غطاء الإبرة الأصفر على الجلد.
- ضع غطاء الإبرة الأصفر على الجلد بزاوية 90 درجة تقريباً.
- لا يتطلب قرص الجلد لدى الكبار والأطفال من عمر 12 سنة وما فوق.

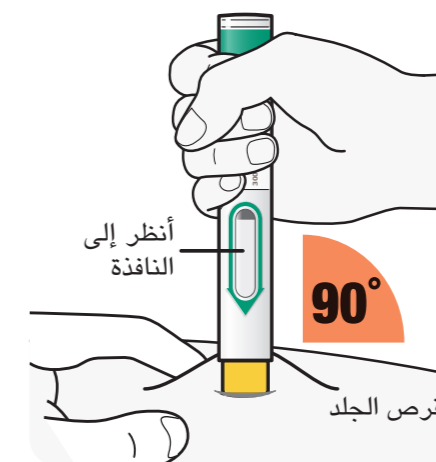


3: إضغط نحو الأسفل - أنظر إلى النافذة حتى تتحول صفراء تماماً - ثم عد حتى 5



- إضغط وأمسك قلم دوبيكسنت بقوة مقابل الجلد حتى لا يمكنك رؤية غطاء الإبرة الأصفر.
- ستسمع صوت "كليك" عند بدء عملية الحقن، ومن ثم
- تبدأ النافذة في التحول إلى الأصفر.
- إستمر في الضغط على قلم دوبيكسنت مقابل الجلد.
- إستمر في الضغط على قلم دوبيكسنت مقابل الجلد حتى تتحول إلى صفراء تماماً، ومن ثم
- سوف تسمع صوت "كليك" ثاني.
- إستمر في الضغط على قلم دوبيكسنت مقابل الجلد.

4: إنزع

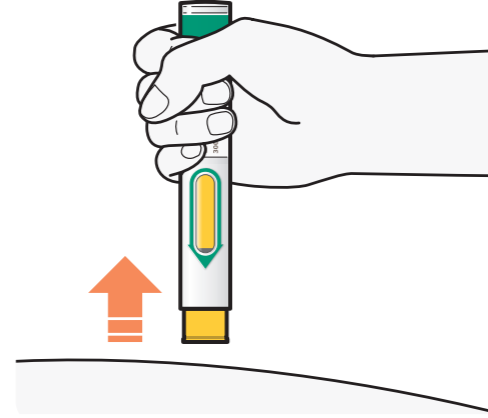

- بعد إتمام عملية الحقن، إسحب بشكل مستقيم لإخراج قلم دوبيكسنت من الجلد. سيغطي غطاء الإبرة الأصفر الإبرة.
- إذا رأيت دمًا في موقع الحقن، إمسح برفق بواسطة كرة قطنية أو ضماد شاشي.
- لا تفرك الجلد بعد الحقن.
- إذا لم تتحول النافذة إلى صفراء تماماً، أو إذا كان يبدو أن الدواء لا يزال يخرج من القلم، فمن الجائز أنك لم تتلق المقدار الدوائي الكامل. تخلص من القلم وتوجه فوراً إلى الطاقم الطبي الخاص بك.
- لا تعط مقداراً دوائياً ثانياً بدون إستشارة الطاقم الطبي.

د. التخلص من قلم دوبيكسنت المستعمل

كيفية التخلص من قلم دوبيكسنت تخلص من أقلام دوبيكسنت المستعملة والأغطية الخضراء في وعاء مقاوم للتقرب، مباشرة بعد الإستعمال.

لا ترم أقلام دوبيكسنت مستعملة وأغطية خضراء في القمامة المنزلية.



- لا تقم بإعادة الغطاء الأخضر للقلم.
- إحفظ الوعاء بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال.