



PRE-FILLED PEN 300 IU - 450 IU - 900 IU

�ט מוכן להזרקה 900 IU - 450 IU - 300 IU

قلم جاهز للحقن 900 IU - 450 IU - 300 IU

Injection instructions

הוראות ההזרקה
تعليمات الحقن



MERCK


جونال - إف® تعليمات الإستعمال

- 1) كيفية إستعمال قلم جونال - إف الجاهز للحقن
- 2) كيفية إستعمال مفكرة العلاجات الخاصة بقلم جونال - إف الجاهز للحقن
- 3) قبل بدء إستعمال قلم جونال - إف الجاهز للحقن
- 4) تحضير قلم جونال - إف الجاهز للحقن
- 5) تحديد المقدار الدوائي الذي وصف من قبل طبيبك
- 6) حقن المقدار الدوائي
- 7) بعد الحقن
- 8) مفكرة العلاجات الخاصة بقلم جونال - إف الجاهز للحقن (أنظري القائمة في النهاية)

نلفت إنتباحك: الرجاء إقرئي تعليمات الإستعمال هذه قبل إستعمال قلم جونال - إف الجاهز للحقن.
إحرصي على متابعة التعليمات بدقة، لأنه من الجائز حصول اختلاف عن تجربتك في السابق.
من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة تعليمات الحقن هذه بصيغة المؤنث. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

١) كيفية إستعمال قلم جونال - إف الجاهز للحقن

- لا تشاركي إستعمال القلم مع الآخرين. القلم مخصص للحقن تحت الجلد فقط.
- الأرقام الظاهرة على نافذة عرض المقدار الدوائي هي بـ [٦٠] وحدات دولية. يوصيك الطبيب كم وحدة [٦٠] يجب أن تحقني كل يوم.
- الأرقام الظاهرة على نافذة عرض المقدار الدوائي تساعدهك:

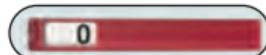

◦ في تحديد المقدار الدوائي الذي وصف لك

◦ من التأكد بأنه تمت عملية حقن كاملة

◦ في قراءة المقدار الدوائي المتبقى للحقن بإستعمال قلم إضافي



◦ إحقني لنفسك كل يوم في نفس الساعة. مثلاً:

• يشرح لك طبيبك أو الصيدلي الخاص بك كم يتطلب من أقلام جونال - إف من أجل إتمام علاجك.

عربي

2) كيفية إستعمال مفكرة العلاجات الخاصة بقلم جونال - إف الجاهز للحقن

مفكرة العلاجات مشمولة في الصفحة الأخيرة من تعليمات الإستعمال هذه.
إستعمل مفكرة العلاجات لتوثيق كمية الـ U التي قمت بحقنها كل مرة.

- وثقي رقم يوم الحقن (1)، التاريخ (2) ووقت (3) الحقن
- في السطر الأول من القائمة، محتوى القلم كان قد وثق من أجلك (4). يجب أن تحيط بدائرة المقدار الدوائي الذي وصف لك من قبل الطبيب.

وثقي المقدار الدوائي الذي وصف لك في قسم الـ «المقدار الدوائي الذي تم وصفه» (5)
تأكد من أنك تحددين المقدار الدوائي الصحيح قبل عملية الحقن (6)
بعد عملية الحقن، إقرئي الرقم الظاهر على نافذة عرض المقدار الدوائي
تأكد من تلقيك حقن كاملة (7) أو وثقي الرقم الظاهر على نافذة عرض المقدار الدوائي في حال كان مختلفاً عن "0"
(8)

إذا دعت الحاجة، إحقني لنفسك بواسطة قلم إضافي، حدد المقدار الدوائي المتبقى المسجل في قسم «الكمية التي تعرض بعد عملية الحقن» (8)

وثقي المقدار الدوائي المتبقى في قسم «الكمية المحددة للحقن» في السطر التالي (6)

نلت إنتباحك:

إن إستعمال مفكرة العلاجات لتوثيق عمليات الحقن اليومية الخاصة بك يتيح لك التأكد كل يوم بأنك
تلقيت المقدار الدوائي الكامل الذي وصف لك.

نماذج لمفكرة علاجات لأقلام بعيارات دوائية مختلفة:
قلم جونال - إف بعيار دوائي قدره IU 300

1 رقم يوم الحقن	2 التاريخ	3 الوقت	4 محتوى القلم (IU) 300 IU	5 المقدار الدوائي الذي تم وصفه (IU)	6		7 نافذة عرض المقدار الدوائي	8
					الكمية المحددة للحقن	الكمية التي تعرض بعد عملية الحقن		
1	10 / 06	07:00	300 IU	125	125	<input checked="" type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقني الكمية بواسطة قلم جديد	
2	11 / 06	07:00	175 IU	125	125	<input checked="" type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقني الكمية بواسطة قلم جديد	
3	12 / 06	07:00	50 IU	125	125	<input type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت	<input checked="" type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقني الكمية 75. بواسطة قلم جديد	
3	12 / 06	07:00	300 IU	غير مناسب	75	<input checked="" type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقني الكمية بواسطة قلم جديد	

قلم جونال - إف بعيار دوائي قدره IU 450

1 رقم يوم الحقن	2 التاريخ	3 الوقت	4 محتوى القلم (IU) 450 IU	5 المقدار الدوائي الذي تم وصفه (IU)	6 الكمية المحددة للحقن	7 نافذة عرض المقدار الدوائي		8 الكمية التي تعرض بعد عملية الحقن 0
1	10 / 06	07 : 00	450 IU	175	175	<input checked="" type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقنني الكمية بواسطة قلم جديد	
2	11 / 06	07 : 00	275 IU	175	175	<input checked="" type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقنني الكمية بواسطة قلم جديد	
3	12 / 06	07 : 00	100 IU	175	175	<input type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت	<input checked="" type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقنني الكمية بواسطة قلم جديد 75	
3	12 / 06	07 : 00	450 IU	غير مناسب	75	<input checked="" type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقنني الكمية بواسطة قلم جديد	

قلم جونال - إف بعيار دوائي قدره IU 900

1 رقم يوم الحقن	2 التاريخ	3 الوقت	4 محتوى القلم (IU) 900 IU	5 المقدار الدوائي الذي تم وصفه (IU)	6 الكمية المحددة للحقن	7 نافذة عرض المقدار الدوائي		8 الكمية التي تعرض بعد عملية الحقن 0
1	10 / 06	07 : 00	900 IU	350	350	<input checked="" type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقني الكمية بواسطة قلم جديد	
2	11 / 06	07 : 00	550 IU	350	350	<input checked="" type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقني الكمية بواسطة قلم جديد	
3	12 / 06	07 : 00	200 IU	350	350	<input type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت	<input checked="" type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقني الكمية 150 بواسطة قلم جديد	
3	12 / 06	07 : 00	900 IU	غير مناسب	150	<input checked="" type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقني الكمية بواسطة قلم جديد	

إنتبهي: المقدار الدوائي الأعظمي الذي يمكنك تحديده بقلم IU 300 هو IU 300، بقلم IU 450 هو IU 450 وبقلم IU 900 هو IU 450.

عربي

(3) قبل بدء إستعمال قلم جونال - إف الجاهز للحقن



- إغسل يديك بالصابون والماء
- أعنري على منطقة نظيفة ومسطحة
- تأكدي من تاريخ إنقضاء الصلاحية المدون على ملصقة القلم
- إجمعي كل ما يلزمك ورتبي ذلك أمامك

أمامك مخطط كيف يبدو القلم وأجزائه:





- (9) واقي الإبرة الداخلي
- (10) غطاء الإبرة الخارجي
- (11) إسفنجية كحولية
- (12)وعاء لجمع النفايات الحادة



- (5) موصل للولبة الإبرة
- (6) غطاء القلم
- (7) لسان الختم القابل للنزع
- (8) إبرة قابلة للتبديل

- (1) زر تحديد المقدار الدوائي
- (2) نافذة عرض المقدار الدوائي
- (3) طرف المكبس
- (4) خرطوشة مخزون الدواء

4) تحضير قلم جونال - إف الجاهز للحقن

4.1 إزعji غطاء القلم.

4.2 تأكدي من أن نافذة عرض المقدار الدوائي مضبوطة لـ "0".

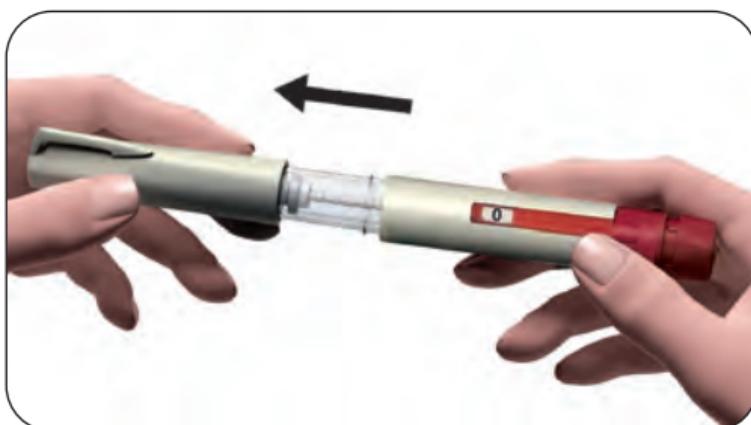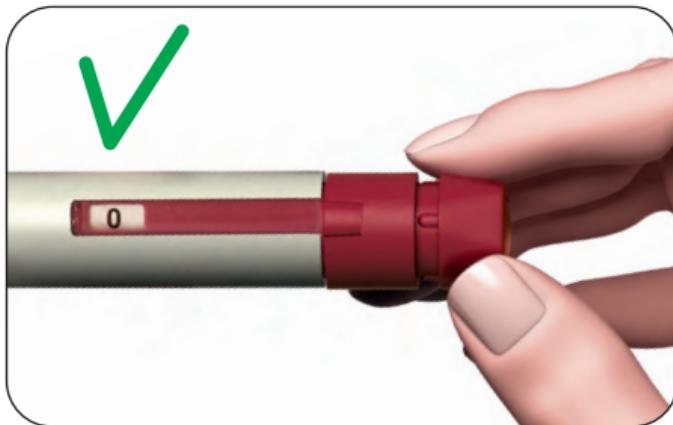



٤.٣ حضري الإبرة الخاصة بك للحقن.

- خذِي إبرة جديدة - إستعملِي فقط إبر "للإستعمال الأحادي" التي تزود من أجل قلم جونال - إف الجاهز للحقن.
- أمسكِي جيداً بالغطاء الخارجي للإبرة تأكدي من عدم تضرر أو إرتخاء لسان الختم القابل للنزع الموجود على غطاء الإبرة الخارجي.
- إنزعِي لسان الختم القابل للنزع.

تحذير:


لا تستعملِي هذه الإبرة في حال تضرر أو إرتخاء لسان الختم القابل للنزع. قومي برميِّه في وعاء جمع النفايات الحادة.
إستعملِي إبرة جديدة.

عربي


٤.٤ أوصلي الإبرة.

- قومي بلوبيبة موصل لولبة الإبرة التابع للقلم إلى داخل الغطاء الخارجي للإبرة إلى أن تشعر بمقاومة بسيطة.

تحذير: لا توصلي الإبرة بإحكام أكثر مما ينبغي؛ من شأن هذا الأمر أن يصعب من نزعها في نهاية عملية الحقن.

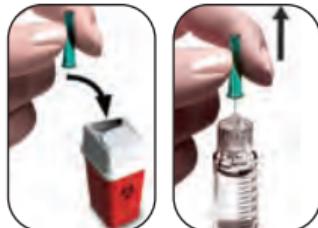

- إنزعِي الغطاء الخارجي للإبرة بلطف عن طريق سحبه.
ضعيفه جانبياً للإستعمال لاحقاً.
- أمسكي قلم جونال - إف الجاهز للحقن بحيث تكون الإبرة موجهة نحو الأعلى.
- إنزعِي بلطف واقي الإبرة الداخلي الأخضر وقومي بر咪ه في وعاء جمع النفايات.

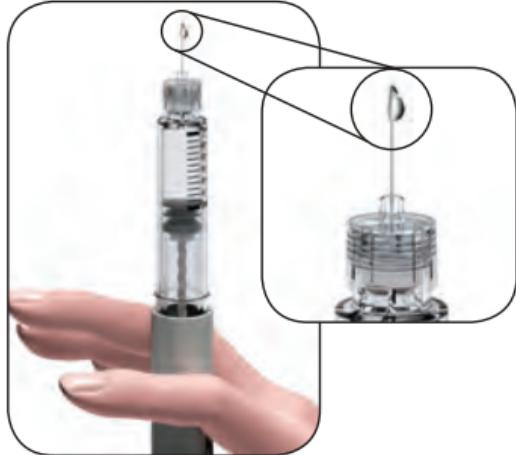

4.5) أنظري عن قرب إلى طرف الإبرة بحثاً عن قطرة صغيرة من السائل.

- إذا لاحظت قطرة صغيرة من السائل تقدمي للفقرة 5:
- تحديد المقدار الدوائي الذي وصف من قبل طبيبك.

تحذير:




يتم البحث عن القطرة فقط في المرة الأولى لاستعمال قلم جونال - إف جديـد، وذلك بهـدف إزالة فقاعـات الهـواء.

تحذير:


إذا لم تشاهدـي قطرـة صـغـيرة في طـرف الإـبرـة أو قـرـيبـاً من طـرف الإـبرـة في المـرـة الأولى التي تستـعملـينـ فيها قـلمـ جـديـدـ، فـأـنـتـ مـلـزـمـةـ بـتـنـفـيـذـ المـراـحـلـ التـالـيـةـ.

عربي

إذا كنت لا تشاهد قطرة صغيرة من السائل في طرف الإبرة أو قريباً من طرف الإبرة في المرة الأولى التي تستعملين فيها قلم جديد:

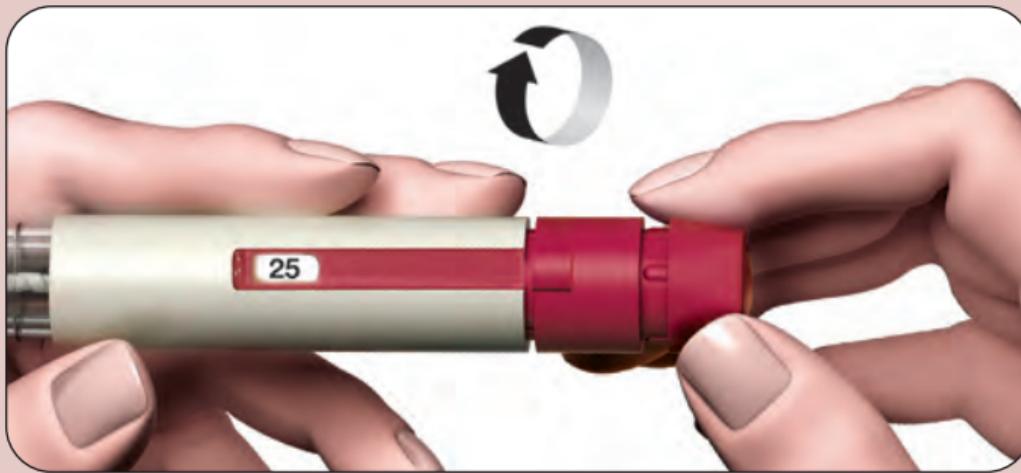

1) دُورِي بطف زر تحديد المقدار الدوائي بإتجاه عقارب الساعة إلى أن تُظهر شاشة المقدار الدوائي القيمة 25 على نافذة عرض المقدار الدوائي. يمكنك تدوير زر تحديد المقدار الدوائي بالإتجاه المعاكس في حال تفويتك القيمة 25.

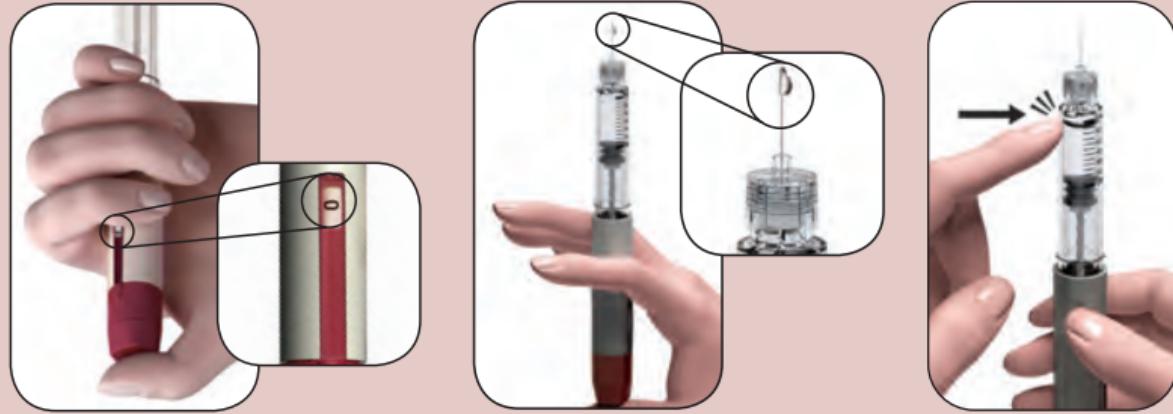


- (2) أمسكي القلم بحيث تكون الإبرة موجهة نحو الأعلى.
- (3) أطمرقي بلف على خرطوشة مخزون الدواء.
- (4) إضغط قدر المستطاع على زر تحديد المقدار الدوائي. ستظهر قطرة صغيرة من السائل في طرف الإبرة.
- (5) تأكدي من ظهور الرقم "0" في نافذة عرض المقدار الدوائي.
- (6) تقدمي للفقرة 5: تحديد المقدار الدوائي الذي وصف من قبل طبيبك.

5) تحديد المقدار الدوائي الذي وصف من قبل طبيبك


5.1) قلم جونال - إف الخاص بك يمكن أن يتتوفر بالعيارات الدوائية التالية:

- قلم جونال - إف الحاوي IU 300 من فوليتروبين ألفا. المقدار الدوائي الأعظمي الذي يمكنك تحديده هو IU 300. المقدار الدوائي الأدنى الذي يمكنك تحديده هو IU 12.5. أو
- قلم جونال - إف الحاوي IU 450 من فوليتروبين ألفا. المقدار الدوائي الأعظمي الذي يمكنك تحديده هو IU 450. المقدار الدوائي الأدنى الذي يمكنك تحديده هو IU 12.5. أو
- قلم جونال - إف الحاوي IU 900 من فوليتروبين ألفا. المقدار الدوائي الأعظمي الذي يمكنك تحديده هو IU 450. المقدار الدوائي الأدنى الذي يمكنك تحديده هو IU 12.5.

5.2) دوري زر تحديد المقدار الدوائي حتى الحصول على المقدار الدوائي المرغوب على نافذة عرض المقدار الدوائي.

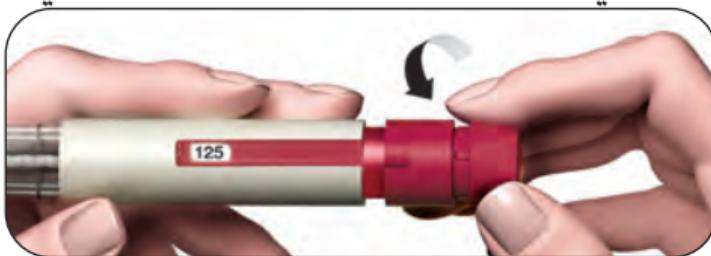


- دوري زر تحديد المقدار الدوائي إلى الخلف لتصحيح المقدار الدوائي

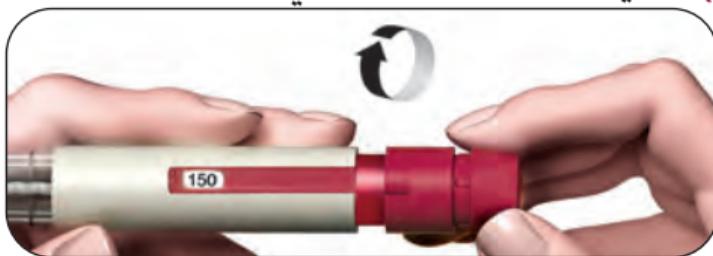

- دوري زر تحديد المقدار الدوائي إلى الأمام للحصول على المقدار الدوائي المرغوب

5.3) حدد المقدار الدوائي الذي وصف من قبل طبيبك (مثلاً في الرسم الذي أمامك المقدار الدوائي هو ٥٠).

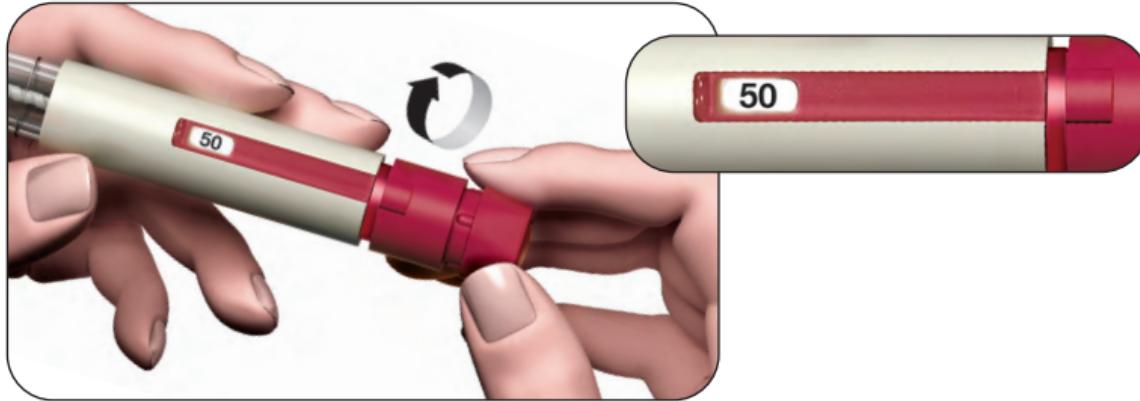

تحذير:

تأكد من أن نافذة عرض المقدار الدوائي تُظهر المقدار الدوائي الكامل الذي وصف لك وذلك قبل أن تتقدمي للمرحلة التالية.



6) حقن المقدار الدوائي

6.1 إختارى منطقة الحقن - حسبما شرح لك الطبيب أو الصيدلى.
لتقليل التهيج في الجلد، إختارى كل يوم منطقة مختلفة للحقن.




6.2 نظفي الجلد بواسطة الإسفنجية الكحولية.
6.3 تأكدى ثانية بأن نافذة عرض المقدار الدوائى تُظهر المقدار الدوائى
الصحيح.

6.4 إحقنى المقدار الدوائى وفقاً للإرشاد الذى تلقيته من طببك أو
من الممرضة.



- أدخل ي ببطء كامل الإبرة إلى داخل الجلد (1).

• إضغط على زر تحديد المقدار الدوائى قدر المستطاع
وأبقي الإبرة داخل الجلد حتى إتمام عملية الحقن.

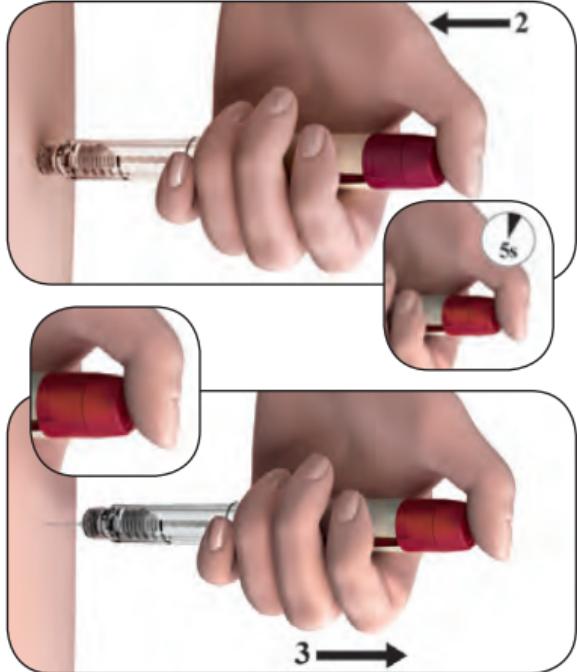

- أبقي زر تحديد المقدار الدوائي مضغوطاً لمدة 5 ثواني (5) على الأقل للتأكد من حقنك لكامل المقدار الدوائي (2). كلما كان المقدار الدوائي أكبر كلما تتطلب وقتاً أطول لحقنه.
- يعود رقم وحدات المقدار الدوائي الظاهر على نافذة عرض المقدار الدوائي إلى 0.

- بعد مضي 5 ثواني على الأقل، بينما تواصلين الضغط على زر تحديد المقدار الدوائي، إسحبِي الإبرة خارج الجلد (3).
- حرري زر تحديد المقدار الدوائي.

تحذير: إحرصي دائماً على إستعمال إبرة جديدة لكل عملية حقن.



7) بعد الحقن

7.1 تأكدي من أنك أجريت عملية حقن كاملة.

- تأكدي بأن نافذة عرض المقدار الدوائي تُظهر "0".



تحذير: إذا ظهر على نافذة عرض المقدار الدوائي رقم أكبر من العدد 0، هذا يدل على أن قلم جونال - إف الجاهز للحقن قد فرغ وأنك لم تتلقى المقدار الدوائي الكامل الذي وصف لك.







7.2 إستكملي عملية حقن جزئية (فقط إذا تطلب الأمر ذلك).

- نافذة عرض المقدار الدوائي تُظهر المقدار الدوائي اللازم للإتمام والذي يتوجب عليك حقنه بواسطة قلم جديد.



- عودي إلى الفقرة 3 («قبل بدء إستعمال قلم جونال - إف الجاهز للحقن») والفقرة 4 («تحضير قلم جونال - إف الجاهز للحقن») بإستعمال قلم جديد.
- حدد المقدار الدوائي للكمية الناقصة التي قمت بتوثيقها في مفكرة العلاجات أو للرقم الذي لا يزال ظاهراً على نافذة عرض المقدار الدوائي في القلم القديم ومن ثم نفذي الحقن.


٧.٣ نزع الإبرة بعد كل عملية حقن.

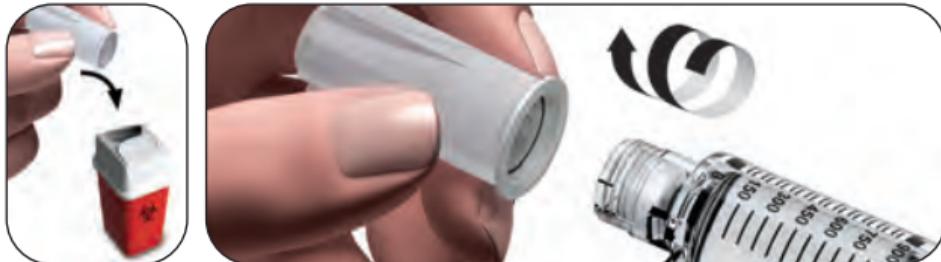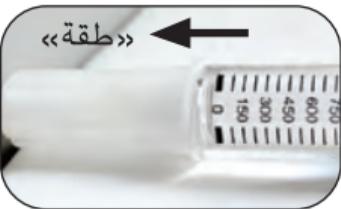

- ضعي غطاء الإبرة الخارجي على سطح مستوي.
- أمسكي بقوة قلم جونال - إف الجاهز للحقن بيده واحدة وقومي بزلق الإبرة إلى داخل غطاء الإبرة الخارجي.

- واصلي بواسطة الضغط على الإبرة المغطاة مقابل مسطح صلب إلى أن تسمعين «طقة».

- أمسكي غطاء الإبرة الخارجي ولولبي الإبرة نحو الخارج بواسطة التدوير عكس عقارب الساعة. إرمي الإبرة في وعاء جمع النفايات الحادة.

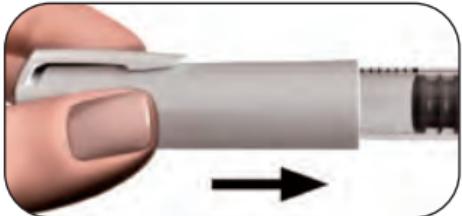

- لا يجوز مطلقاً معاودة إستعمال نفس الإبرة المستعملة. لا يجوز المشاركة في إستعمال إبر.
- أعيدي غطاء القلم إلى مكانه.

٧.٤) تخزين قلم جونال - إف الجاهز للحقن.

تحذير:

لا يجوز مطلقاً تخزين القلم والإبرة موصولة به. دائمًا إنزعِي الإبرة عن قلم جونال - إف الجاهز للحقن وذلك قبل أن تعيدي غطاء القلم إلى مكانه.

- خزني القلم في علبة الأصلية وفي مكان آمن.
- عندما يكون القلم فارغا، إسألني الصيدلي عن كيفية رميه.

تحذير:

لا يجوز رمي أدوية إلى مياه المجاري أو إلى القمامة المنزلية.



عربي

٨) مفكرة العلاجات الخاصة بقلم جونال - إف الجاهز للحقن

١ رقم يوم الحقن	٢ التاريخ	٣ الوقت	٤ محتوى القلم (IU)	٥ المقدار الدوائي الذي تم وصفه (IU)	٦		٧ نافذة عرض المقدار الدوائي	٨ الكمية التي تعرض بعد عملية الحقن
					الكمية المحددة للحقن	٠		
	/	:	300/450/900 IU			<input type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقنني الكمية بواسطة قلم جديد	
	/	:	----- IU			<input type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقنني الكمية بواسطة قلم جديد	
	/	:	----- IU			<input type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقنني الكمية بواسطة قلم جديد	
	/	:	----- IU			<input type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقنني الكمية بواسطة قلم جديد	
	/	:	----- IU			<input type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقنني الكمية بواسطة قلم جديد	
	/			<input type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقنني الكمية بواسطة قلم جديد	

	/	:	-----IU		الإداهات ٥ ، محسبي عملية الحقن قد تمت	إذا لم يكن "0" ، فإحقي الكمية بواسطة قلم جديد
	/	:	-----IU		<input type="checkbox"/> إذا كانت "0" ، فإن عملية الحقن قد تمت	إذا لم يكن "0" ، فإحقي الكمية بواسطة قلم جديد
	/	:	-----IU		<input type="checkbox"/> إذا كانت "0" ، فإن عملية الحقن قد تمت	إذا لم يكن "0" ، فإحقي الكمية بواسطة قلم جديد
	/	:	-----IU		<input type="checkbox"/> إذا كانت "0" ، فإن عملية الحقن قد تمت	إذا لم يكن "0" ، فإحقي الكمية بواسطة قلم جديد
	/	:	-----IU		<input type="checkbox"/> إذا كانت "0" ، فإن عملية الحقن قد تمت	إذا لم يكن "0" ، فإحقي الكمية بواسطة قلم جديد
	/	:	-----IU		<input type="checkbox"/> إذا كانت "0" ، فإن عملية الحقن قد تمت	إذا لم يكن "0" ، فإحقي الكمية بواسطة قلم جديد
	/	:	-----IU		<input type="checkbox"/> إذا كانت "0" ، فإن عملية الحقن قد تمت	إذا لم يكن "0" ، فإحقي الكمية بواسطة قلم جديد

1 رقم يوم الحقن	2 التاريخ	3 الوقت	4 محتوى القلم (IU)	5 المقدار الدوائي الذي تم وصفه (IU)	6		7 نافذة عرض المقدار الدوائي	8 الكمية التي تعرض بعد عملية الحقن
					الكمية المحددة للحقن	0		
/	:	300/450/900 IU			<input type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت		<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقني الكمية بواسطة قلم جديد	
/	:	----- IU			<input type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت		<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقني الكمية بواسطة قلم جديد	
/	:	----- IU			<input type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت		<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقني الكمية بواسطة قلم جديد	
/	:	----- IU			<input type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت		<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقني الكمية بواسطة قلم جديد	
/	:	----- IU			<input type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت		<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقني الكمية بواسطة قلم جديد	
/	:	----- IU			<input type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن عملية الحقن قد تمت		<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقني الكمية بواسطة قلم جديد	
/	:	----- IU	III		<input type="checkbox"/> إذا كانت "0"، فإن		<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0"، فإحقني	

	/	:	_____ IU			<input checked="" type="checkbox"/> عملية الحقن قد تمت	الكمية بواسطة قلم جديد
	/	:	_____ IU			<input type="checkbox"/> إذا كانت "0" ، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0" ، فلأحقني الكمية بواسطة قلم جديد
	/	:	_____ IU			<input type="checkbox"/> إذا كانت "0" ، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0" ، فلأحقني الكمية بواسطة قلم جديد
	/	:	_____ IU			<input type="checkbox"/> إذا كانت "0" ، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0" ، فلأحقني الكمية بواسطة قلم جديد
	/	:	_____ IU			<input type="checkbox"/> إذا كانت "0" ، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0" ، فلأحقني الكمية بواسطة قلم جديد
	/	:	_____ IU			<input type="checkbox"/> إذا كانت "0" ، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0" ، فلأحقني الكمية بواسطة قلم جديد
	/	:	_____ IU			<input type="checkbox"/> إذا كانت "0" ، فإن عملية الحقن قد تمت	<input type="checkbox"/> إذا لم تكن "0" ، فلأحقني الكمية بواسطة قلم جديد

إنتبهي: المقدار الدوائي الأعظمي الذي يمكنك تحديده بقلم IU 300 هو IU 450، بقلم IU 450 هو IU 900 و بقلم IU 450 هو IU 450.

تمت المصادقة على تعليمات الإستعمال من قبل وزارة الصحة في تشرين الأول 2017

عربي