

הוראות שימוש במשאף אונברץ בריזהלהר
אנא קרא את ההוראות השימוש המלאות לפני שימוש באונברץ בריזהלהר.



בדיקות המכוסה ריקת



שאף עמוק



נקב ושלחן



הכנו



בדיקות




בדיקות המכוסה ריקת
פתח את המשאף כדי לראות
אם נשארה אבקה בתוך
המכוסה.

אם נשארה אבקה בתוך
המכוסה:

- סגור את המשאף.
- חוזר על שלבים 3 עד 3ג.

ריקה נותרה אבקה

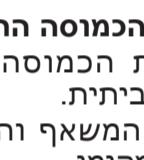

הוציא את המכוסה הריקת
השלך את המכוסה הריקת.
באשפיה הביניתית.
סגור את המשאף והחזיר את
המכוסה למקוםו.



שלב 3ב:

שאף עמוק את התרופה
החזק את המשאף כמודגם באוויר.
שים את הפיה בתוך הפה וסגור
הטיבב את השפתיים סביבה.
אין ללחוץ על הכפתורים
הצדדים.


נשומם פנימה במהירות, עמוק ככל
האפשר.

במהלך השאייפה אתה תשמע
צליל של רשרוש.

אתה עלול לחוש בטעם של
התרופה במהלך השאייפה.



שלב 2ב: שחרר את הכפתורים הצדדים

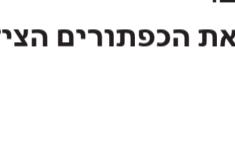

שלב 2ב:



שלב 1ב: פותח את המשאף

מידע חשוב

- תמיד יש לאחסן את המכוסות
של אונברץ בריזהלהר בתוך
המגשית ולהוציאן רק מיד
לפני השימוש.
- אל תבלעו את המכוסה.
- אל תשתמש המכוסות אונברץ
בריזהלהר עם משאף אחר.
- אל תשתמש המשאף בלבד
אונברץ בריזהלהר לניטילה של
מכוסות אחרות.
- לעולם אל תשים את המכוסה
בפיר או בפיית המשאף.
- אל תלחץ על הכפתורים
הצדדים יותר מפעם אחת.
- אל תנשוף לתוך פיית המשאף.
- אל תלחץ על הכפתורים
הצדדים בזמן שאתה שואף
בעזרת הפיה.
- אל תשתמש המכוסות עם
ידיים רטובות.
- לעולם אל תשטו את המשאף
על רגליים.
- שלר במים.

שלב 3ג:

עצירת נשימה
עצור את נשימתך למשך 5 שניות.

שלב 1ג:

הוציא את המכוסה
הוציא מכוסה אחת מהמגשית.
אין לבלו את המכוסה.

שלב 1ד:

הכנס את המכוסה
לעולם אין להכניס את המכוסה
ישירות לתוך הפיה.

שלב 1ה:

סגור את המשאף

שלב 1ה:

